

İnaktivasyon ve Taşıma Solüsyon Kiti

Kat. No: 23S-04-01

İçerik : Tris-HCL , EDTA, Protein Denatürant , Lipid Solvent

Fiziksel Özellik : Sıvı, renksiz

Açıklama: Bu ürün, tanı ve araştırma amaçlı viral transport işlemlerinde zarflı ve zarfsız virüslerin inaktive bir şekilde taşınması amacıyla kullanılır.

Ürün Özellikleri: Bu ürün, moleküler viroloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik ve kimya alanlarında kullanılır. Ürün, RNA/DNA izolasyon işlemleri için uygundur ve DNAaz, RNAaz, ekzonükleaz ve endonükleaz içermez. Yalnız laboratuvar kullanımı içindir.

Kullanımı:

1. Nazal/Nazofrangial swab örnekleri solüsyon içerine daldırılır ve birkaç kez karıştırılır.
2. Daha sonra swab örneği tıbbi atık olarak atılır.
3. Solüsyon oda sıcaklığında 10 dk. bekletilir.
4. Viral inaktivasyonu tamamlanmış olan örnek DNA/RNA izolasyonu ve takip eden Real Time PCR dahil tüm moleküler çalışmalar için kullanılır.

Uyarılar:

- Ciltle temas halinde tahriş edici olabilir.
- Eldivensiz kullanmayın.
- Olası temas durumunda bol su ile yıkayın.
- Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın.
- Ürünün raf ömrü 18 aydır.
- Sorularınız için lütfen Ar - Ge bölümü ile temasa geçiniz. tech@snp.com.tr

Saklama Koşulu : Oda Sıcaklığı

Düzenlenme Tarihi: 20.03.2020